

聴
診
器
選
び

は
じ
め
て
の



私の相棒だから
全てを知って
選びたい





うーん

どれがいいのかわかんない

看護学校入学予定
しらかわ あやは
白川 彩葉(18)



チェストピース？


バネが耳に優しい？

耳管が動く？

成人用と小児用の機能を併せ持つ聴診器



値段はピンキリだし
実習先とか就職してから
配属される科によっても
向き不向きがあるみたいだし

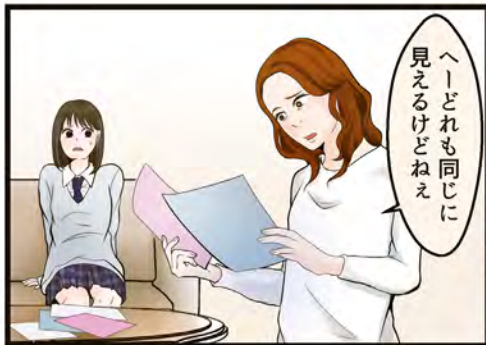


へーどれも同じに見えるけどねえ





どうしたの？
彩葉

看護学校に入学する前に
教科書とかの他に
聴診器を買わなきゃ
いけないんだけど

どれを買えばいいのか
わからないんだよ

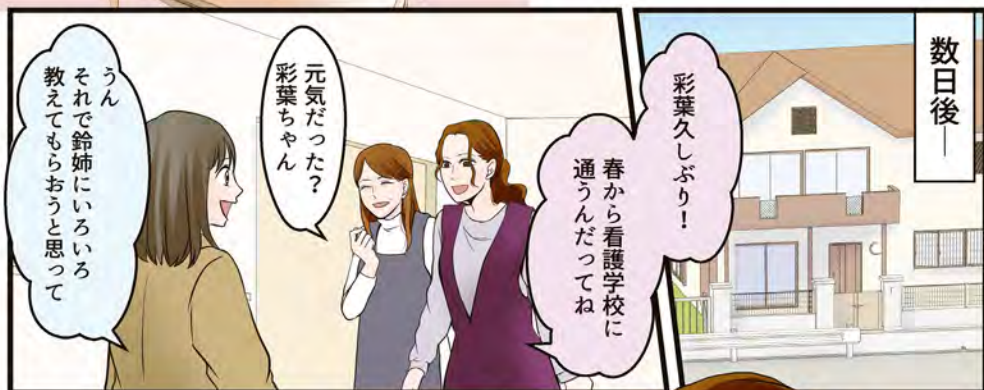

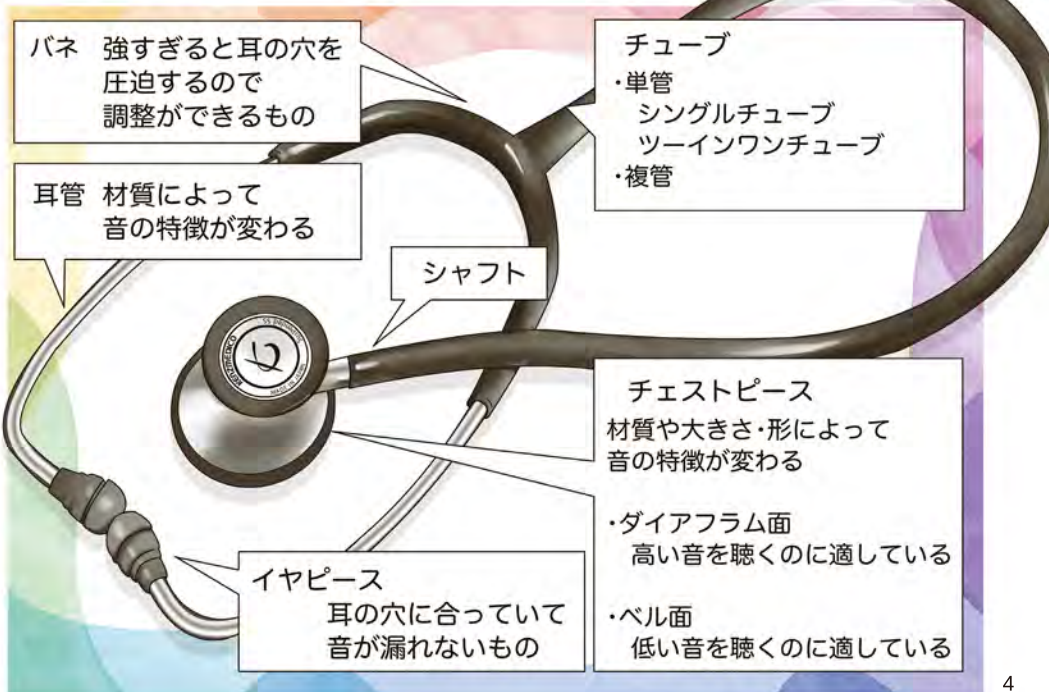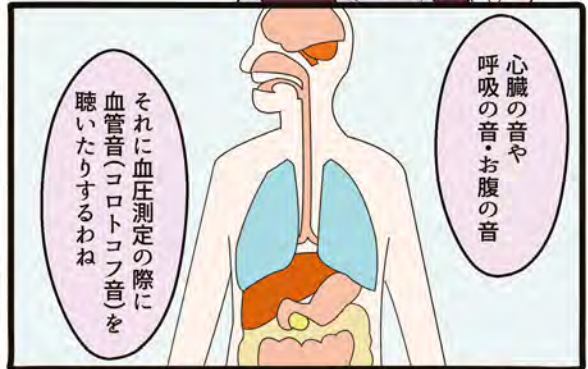

イヤピースや
パネの強さは
自分に合ったものを
選ぶのね

ねえこれって
どうやってつけるの？


これはメイドインジャパンで
有名なケンツメディコの
聴診器んだけど
装着方法はね…

聴診器の装着方法

ケンツメディコの聴診器は
いろいろな人の耳の角度に
合うように耳管が動く

装着して微調整

ハの字にしておく

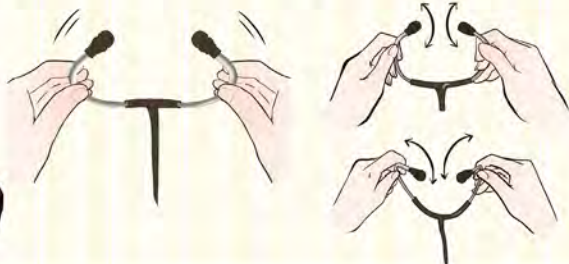


これでぴったり
フィットするのよ！



チェストピースの 大きい面と小さい面の切り替え方

・シャフトのくぼみを確認
反対の面が使用できる
この場合は大きい面

・チェストピースを回して
大きい面と小さい面を
切り替える

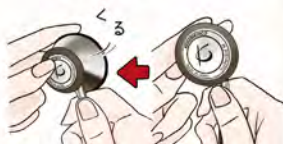

・振動板(膜)
こすってみて音がすれば
その面が使用できる



チェストピースの
大きい面と小さい面の
切り替え方法はこうよ




なるほど！

自分の耳に合った
使いやすい聴診器を
選ぶってことだね




お



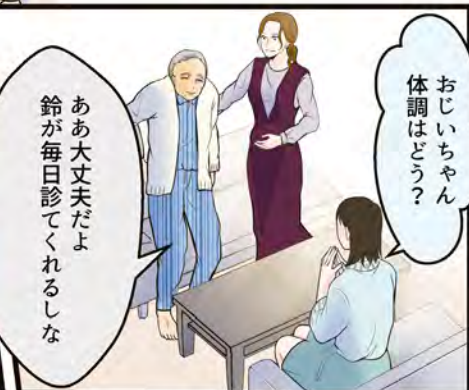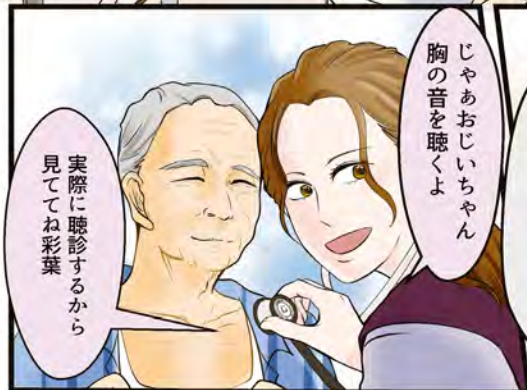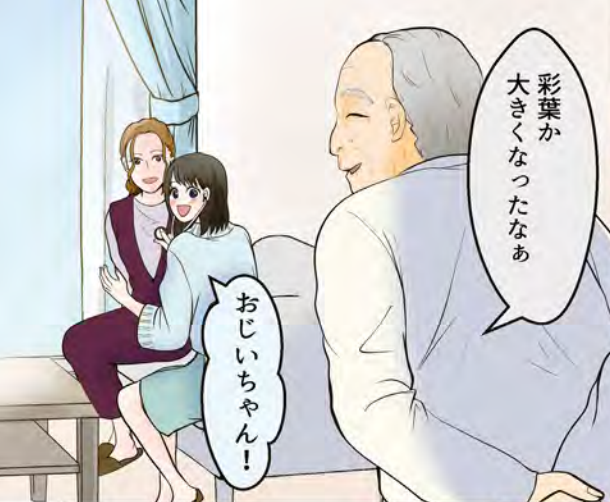

サスペンデッド型ダイヤフラム

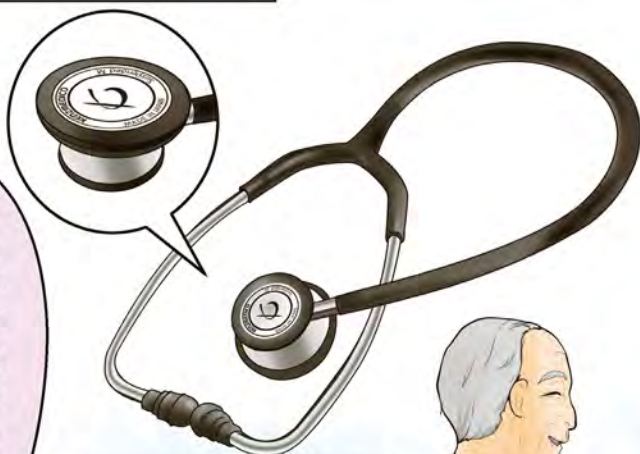

これはフレアーフォネット
No.137IIIっていう
聴診器なんだけどね

サスペンデッド型ダイヤフラムを
両面に装備しているから
この聴診器ひとつで成人も小児も
痩せた人でも聴診できるのよ

フレアーフォネット
No.137III



サスペンデッド型
ダイヤフラム

- ・軽くあてる→心臓の低い音が聴きやすい
- ・強くあてる→呼吸の高い音が聴きやすい

大きい面は成人用
小さい面は小児用
それぞれ変更・交換可能よ

成人用



スタンダード型
ダイヤフラムに
変更可能



専門分野の呼吸音、聞き取りの
難しい高い音が聴きやすい

小児用



ベル型に変更可能



心臓のIII音・IV音などの
低い音が聴きやすい


耳に優しい？

それに音もすごく良いし
耳に優しいのよ

へーそれはいいね

この聴診器はあてたときに
ヒヤツとしないんだよ

耳管の
角度調整ができる

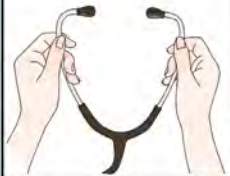

金属部分には
比重の重い
ステンレスを使用

バネが耳に優しくフィット

イヤピースが
回転して耳への
摩擦を減らす

良い音が聞こえるように
きちんと装着できて
耳に優しい工夫が
してあるのよ




わーかわいい！

16色あるから
好きな色を選べるの




付属品には大ききや
形の違うイヤピースが
付いているし

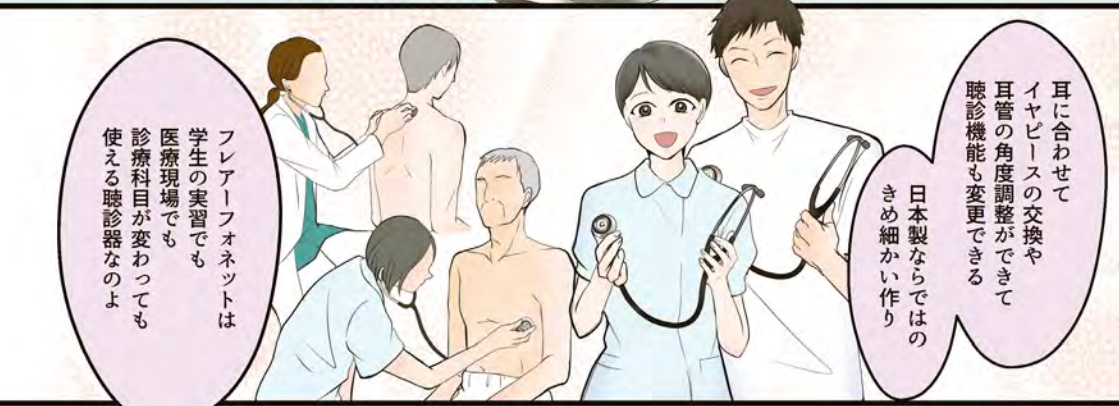

フレアーフォネットは
学生の実習でも
医療現場でも
診療科目が変わっても
使える聴診器なのよ


耳に合わせて
イヤピースの交換や
耳管の角度調整ができて
聴診機能も変更できる
日本製ならではの
きめ細かい作り

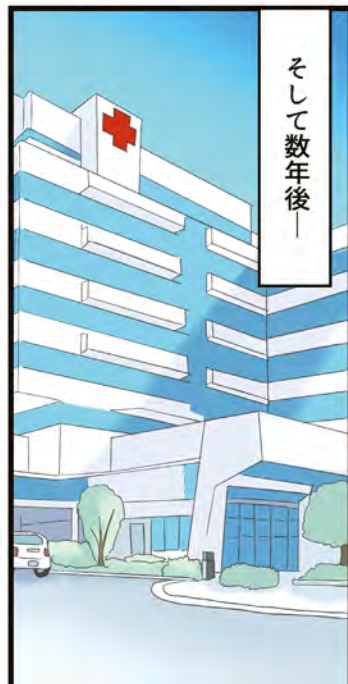

そして数年後――



私もフレアーフォネットに
決めちゃうよ
ありがとう鈴姉！

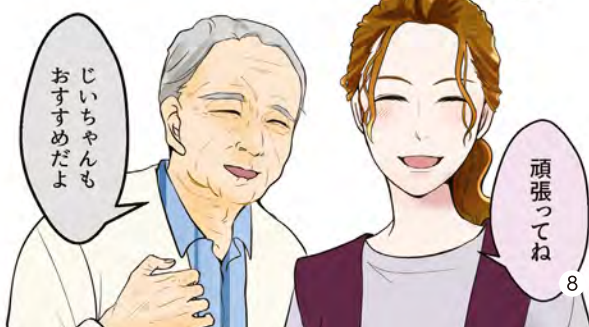

じいちゃんも
おすすめだよ

頑張ってるね



はい山本さん
すぐに伺いますね



よし
今日も患者さんのために
頑張るぞ!



心配ないですよ




ありがとうございます！
ございます！

白川さん
だいぶ仕事にも
慣れてきたわね

マンガ/シンフィールド

FIT!
する理由
1

角度調節で耳にフィット

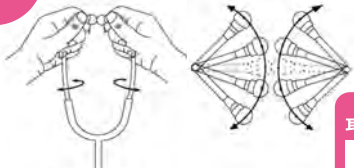

誰の耳にもぴったり合う様に、耳管の角度調節ができます。
耳孔に確実にフィットさせることで、音を逃さず快適な着感を実現しました。

【動画】
耳管の角度調節

FIT!
する理由
2

回転ソフトイヤピース



回転式にすることで、耳孔にイヤピースがフィットしたまま耳管が回転し、耳孔の摩擦を軽減します。

【動画】
回転ソフトイヤピース

- ブラック 0137B361
- ネイビーブルー 0137B362
- セイルブルー 0137B363
- ライラック 0137B364
- スカイブルー 0137B365
- ピンク 0137B366
- ラズベリーピンク 0137B367
- バーガンディ 0137B368
- グレー 0137B369
- ダークネイビー 0137B370
- ハンターグリーン 0137B371
- チョコレート 0137B372
- パールピンク 0137B373
- パールブルー 0137B374
- パールプラム 0137B375
- ブラック エ디션 0137B381

品名
フレアフォネット ライト No.125II
希望小売価格 ¥13,000(税別)
製造販売届出番号 11B2X00021125201

- 全 長約720mm
- 重 量約100g
- 付属品
ソフトイヤピース大1セット
シーリングチップ大・小1セットずつ
抗菌リング1ヶ
スタンダード型ダイヤフラム1枚
カバーリング1ヶ

成人・小児
兼用モデル

装着時の
ストレス
軽減

アルミ製
軽量約
100g

- ブラック 0125B201
- ネイビーブルー 0125B202
- セイルブルー 0125B203
- ライラック 0125B204
- スカイブルー 0125B205
- ピンク 0125B206
- ラズベリーピンク 0125B207
- バーガンディ 0125B208
- グレー 0125B209
- ダークネイビー 0125B210
- ハンターグリーン 0125B211
- チョコレート 0125B212
- パールピンク 0125B213
- パールブルー 0125B214
- パールプラム 0125B215

カバーリング



小児用面に取り付けることで、スタンダードなダブル聴診器になります。



軽さで選ぶならコレ!

詳しい特徴は
こちらから

説明動画

【成人用面は2WAY仕様】・サスペンデッド型ダイヤフラムとスタンダード型ダイヤフラムの交換可能。シーンに合わせて音を選べる。【小児用面はダイヤフ優れた音響特性のステンレス製】・チェストピースと耳管は、優れた音響特性をもつステンレス製。フレアフォネット ライト No.125 II: 【フレアフォネット

安心の日本製 / ケンツメディコの聴診器は

耳にやさしく FIT!

耳の中の
摩擦が
少なく快適!

長時間
つけても
痛くなり
にくい!



ケンツメディコオリジナル機能 回転ソフトイヤピース

耳孔の摩擦を軽減。

ケンツメディコオリジナル機能 耳管

音響特性に優れたステンレス製。
角度調節が可能。

ベル面に
変換可能

変換
機能

小児用面

2WAY
仕様
成人用面



パネ (内パネ式)

適度な圧力で
程よく把持します。

チェストピース

音響特性に優れた
ステンレス製。

聴診可能な面を見分
けることができます。
シャフトにほみがある
と、その反対の
面が使用可能。

チューブ

肉厚チューブが
音を逃しません。

成人・小児
兼用モデル

重厚感ある
ステンレス
製

クリアな
音質
耳にやさしい
装着感

品名

フレアーフォネット No.137Ⅲ

希望小売価格 ¥17,000(税別)
製造販売届出番号 11B2X00021137361

品名

フレアーフォネット No.137Ⅲ ブラックエディション(特別仕様)

希望小売価格 ¥18,800(税別)
製造販売届出番号 11B2X00021137361

- 全長 約720mm ●重量 約175g
- 付属品 ソフトイヤピース大1セット
シーリングチップ大・小1セットずつ
抗菌リング1ヶ
スタンダード型ダイヤフラム1枚
カバーリング1ヶ


詳しい特徴は
こちらから



プロモーション
動画



音質に
こだわるなら
コレ!

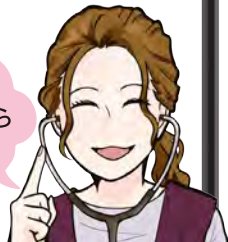

シーリングチップ



より軟らかいシーリングチップは、
耳孔の形に馴染みやすく、遮音性
が向上します。※固着式です。

ソフトイヤピース大



※ソフトイヤピース小は製品に標準装備さ
れております。

ダイヤフラム、リング

スタンダード型
ダイヤフラム

リング



※サスペンデッド型ダイヤフラムは製品に
標準装備されております。ダイヤフラムとリ
ングは一体型です。

付属品

製品特徴

【成人・小児兼用】・成人用と小児用のサスペンデッド型ダイヤフラムを両面に標準装備。この聴診器ひとつで、成人から小児まで聴診可能。
ラム面からベル面に交換可能】・ダイヤフラムを外し、カバーリングを取り付けるとベル面になります。フレアーフォネット No.137Ⅲは
No.137Ⅲのライトウェイトバージョン】・アルミ製で軽量。・ポケットに入れて持ち運びがしやすいです。



KENZMEDICO

本社：埼玉県本庄市児玉町共栄552番地1

■製品に関するお問い合わせ・カタログ請求

MAIL: eigyo@kenzmedico.co.jp

TEL : 0495-71-1001 / FAX: 0495-72-6716

ホームページ



LINE公式
アカウント



購入に関するご相談
修理・パーツの交換方法は
ケンツメディコ
LINE公式アカウントへ
ID: @629twcct